



Femcap,

Cape cervicale pour la contraception

La FemCap est un dispositif barrière pour la contraception conçu pour empêcher la pénétration du sperme dans l'utérus. La cape se place au fond du vagin sur le col de l'utérus.

Utilisation :

- Introduire la cape au plus tard 15 minutes avant toute excitation sexuelle
- Vérifier la position de la FemCap immédiatement après l'insertion de celle-ci et de nouveau avant tout rapport sexuel.
- Attendez au moins 8 heures après le dernier rapport sexuel pour enlever la cape.
- La cape peut rester en place pendant environ 48 heures.

Indication importante: Femcap ne peut être utilisée qu'avec un gel spermicide (ou Contragel Vert gel conçu pour compléter un diaphragme ou une cape cervicale)

Prescription et Coût :

- Une cape est vendue sur ordonnance, **donc obligatoirement prescrit par un médecin ou une sage femme**
- Il faut déterminer la taille et vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication
- La patiente doit se rendre chez le pharmacien avec l'ordonnance
- Femcap étant en silicone, elle se conserve plusieurs années.

Matériaux : Silicone Médical

Taille :

22mm petite taille :

Femmes n'ayant jamais accouchées

26mm taille moyenne :

Femmes ayant eu une IVG ou une césarienne

30mm taille normale :

Femmes ayant accouché par voie naturelle

EAN :

22 mm : 4013273003223

26 mm : 4023273003261

30 mm : 4013273003308

Fabriqué aux Etats Unis

Dispositif médical de classe II

Distributeur Français:

Bivea

ZA Actipolis

Av Ferdinand de Lesseps

33610 Canéjan

Tél : 05 57 26 09 00

Fax : 05 57 26 53 48

info@bivea.com