



# Caya diaphragme le bon positionnement

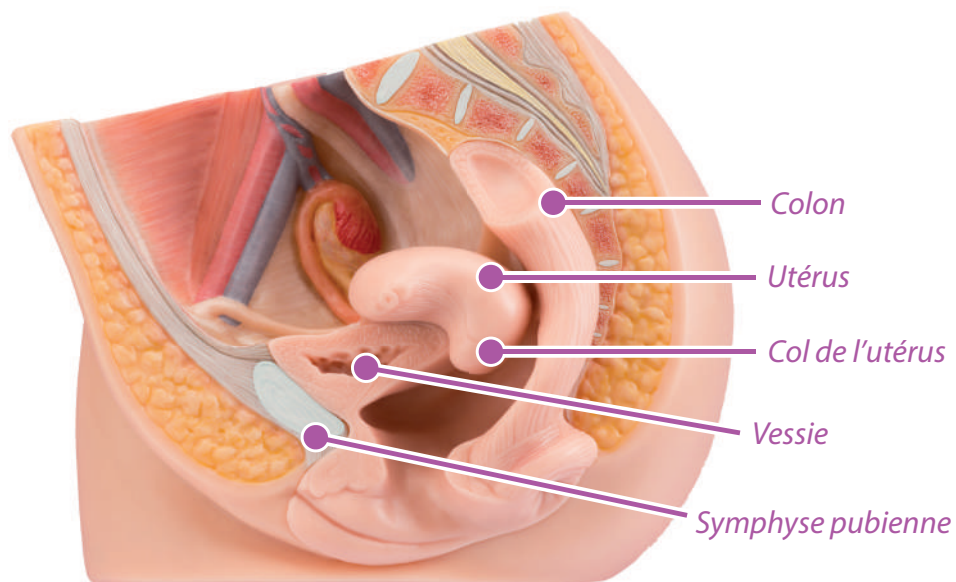

CAYA MODÈLE PELVIEN

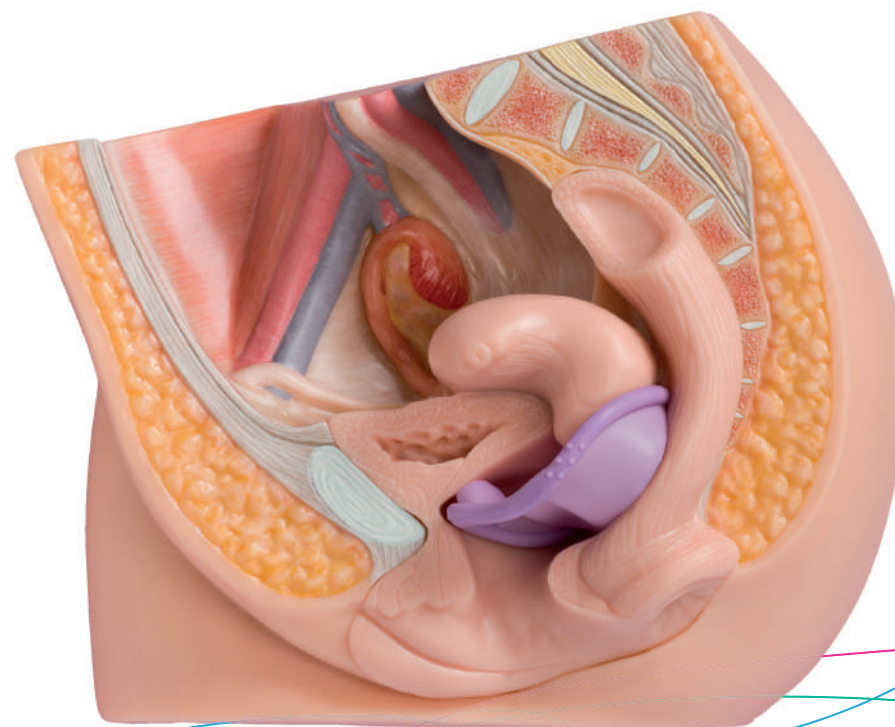

CAYA MODÈLE PELVIEN AVEC DIAPHRAGME CAYA





## DIAPHRAGME CAYA

- Sûr
- Sans hormones
- Taille unique

Le diaphragme Caya est vendu exclusivement sur ordonnance en pharmacie. Il doit toujours être utilisé avec un gel contraceptif.

Sur la base de remboursement de 3,14 €.

Réutilisable pendant deux ans

ACL : 5169956

Prix conseillé : 39,95 €



## CAYAGEL

Gel contraceptif à base d'acide lactique et de cellulose



ACL : 5169962

Prix conseillé : 12,95 €



## TRIPLE SÉCURITÉ

- 1 • **Membrane en silicone** : barrière mécanique
- 2 • **Cellulose dans Cayagel** : 2<sup>ème</sup> barrière mécanique au niveau du col de l'utérus
- 3 • **Acide lactique dans Cayagel** : immobilisation des spermatozoïdes

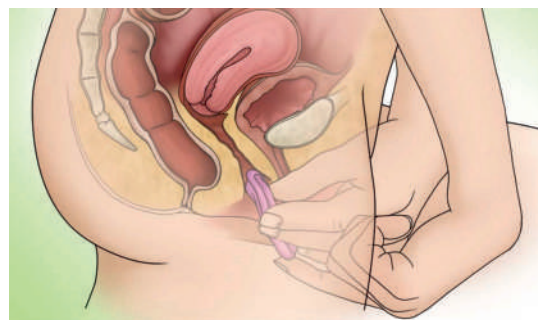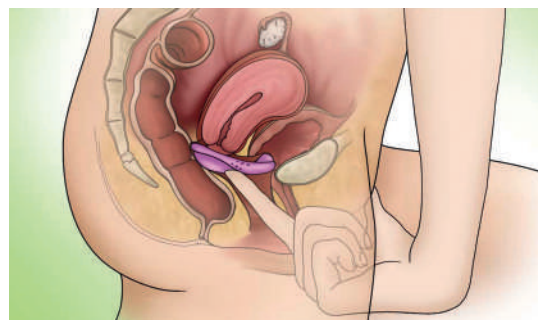

## UTILISATION DE CAYA

- Mettre 4 ml de gel contraceptif dans Caya.
- Il est plié et poussé (la flèche vers le corps) jusqu'au fond du vagin.
- Il est placé derrière la symphyse pubienne au niveau du cul-de-sac vaginal en recouvrant le col de l'utérus.
- Il peut être placé jusqu'à 2 heures ou juste avant le rapport sexuel.
- Il est recommandé de remettre du Cayagel en cas de rapports consécutifs à l'aide de l'appliqueur.
- Le diaphragme doit être gardé au moins 6 heures après le rapport (durée de vie des spermatozoïdes dans le vagin).

## CONTRE-INDICATIONS

- Pendant les 6 semaines post-partum.
- Femme utilisant un diaphragme de taille 60 ou supérieure à 80 mm (2,7% des femmes).
- Prolapsus très important.
- Fossette rétro symphysaire trop peu prononcée ou inexistante.
- Infections urinaires fréquentes.