

Wingman

Next generation condoms

EN – USER INSTRUCTIONS & SAFETY PRECAUTIONS
 NL – GEBRUIKSAANWIJZING & VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN
 IT – ISTRUZIONI D'USO & PRECAUZIONI DE SICUREZZA
 DA – BRUGSANVISNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
 RO – GHIDUL UTILIZATORULUI ȘI NORME DE SIGURANȚĂ
 CZ – NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 PL – INSTRUKCJA UŻYCIA I PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA



FR - MODE D'EMPLOI ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant utilisation, vérifiez la date de péremption figurant sur l'emballage. Ouvrez l'emballage par le bord dentelé et retirez soigneusement les ailettes et le préservatif. Manipulez le préservatif avec précaution, même lorsque vous le sortez de l'emballage, afin d'éviter qu'il ne soit endommagé par les ongles, les bijoux, etc. N'utilisez pas le préservatif si les matériaux en caoutchouc sont collants ou cassants. Si l'emballage individuel est manifestement endommagé, jetez-le et utilisez un nouveau préservatif provenant d'un emballage intact.

1. Placez le préservatif au bout du pénis en érection, le logo sur les ailes vers le haut.
2. Poussez doucement les deux ailes vers le bas et utilisez une ou deux mains pour dérouler le préservatif aussi loin que possible.
3. Retirez les ailes du préservatif en les écartant du corps à l'endroit où elles se rejoignent. Le préservatif est maintenant prêt à l'emploi.
4. Arrêtez-vous et vérifiez quand le préservatif glisse ou s'il est trop serré autour du pénis, car cela peut entraîner une rupture.
5. Juste après l'éjaculation, et alors que votre pénis est encore rigide, tenez le préservatif près de la base du pénis et tirez-le doucement vers l'arrière.
6. Retirez le préservatif de votre pénis en le faisant glisser lentement. Il est important que le pénis ou le préservatif usagé ne touche pas la zone vaginale après le retrait.
7. Enveloppez le préservatif usagé et les ailes et jetez-les de manière hygiénique dans une poubelle fermée, et non dans les toilettes.
8. Si vous souhaitez utiliser un lubrifiant supplémentaire, utilisez le type de lubrifiant approprié recommandé pour les préservatifs et évitez d'utiliser des lubrifiants à base d'huile tels que la gelée de pétrole, l'huile pour bébé, la lotion corporelle, les huiles de massage, le beurre, la margarine, etc. car ils sont nocifs pour l'intégrité du préservatif.

- Les préservatifs et les ailettes sont à usage unique; la réutilisation d'un préservatif peut augmenter le risque de détérioration et d'infection du préservatif.
- Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les ailettes ne cassent pas et n'endommagent pas le préservatif. Il est recommandé de ne toucher que les ailes pour minimiser le risque d'endommager le préservatif.
- L'appliqueur est conçu pour faciliter la mise en place du préservatif.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Il existe un risque d'étouffement lors de l'utilisation orale du préservatif.
- L'utilisation d'un lubrifiant supplémentaire lors de rapports anaux peut réduire le risque de rupture.
- Le préservatif est un dispositif médical qui peut être utilisé par des profanes - hommes ou femmes adultes.
- Tout incident d'utilisation grave peut être signalé au fabricant et à l'autorité nationale compétente.
- Ces préservatifs sont conformes aux normes internationales ISO 4074/ EN ISO 4074.
- Conservez-les dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Attention:

Si le préservatif commence à s'enrouler pendant l'utilisation, il faut le faire redescendre immédiatement. Si les préservatifs en latex sont utilisés correctement à chaque rapport sexuel, ils contribuent à prévenir les grossesses et à réduire le risque de transmission du VIH/sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Consultez un médecin dès que possible, au moins dans les 72 heures, si le préservatif fuit ou se déchire pendant l'utilisation. Consultez un médecin ou un pharmacien sur la compatibilité des médicaments topiques qui peuvent entrer en contact avec le préservatif. Ce produit contient du latex naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique. Si vous êtes allergique au latex, consultez votre médecin avant de l'utiliser. Avertissement : aucun produit contraceptif ne garantit une protection à 100 % contre la grossesse, les IST ou le virus VIH. Si vous pensez que vous ou votre partenaire êtes enceinte ou infectée, consultez immédiatement votre médecin.

EN: Authorized Representative in the European Union	FR: Représentant autorisé dans l'Union européenne
NL: Gernachtigd vertegenwoordiger in de Europese Unie	ES: Representante autorizado en la Unión Europea
DE: Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union	IT: Rappresentante autorizzato nell'Unione Europea
EN: European Conformity	ES: Certificado CE Europeo
NL: Europese CE certificering	IT: Certificazione CE europea
FR: Certification Européennes CE	DE: Europäische CE-Zertifizierung
EN: Contains natural rubber latex	ES: Contiene latex natural
NL: Bevat natuurlijk latex	DE: Enthält Naturkautschuk
FR: Contient du caoutchouc de latex naturel	IT: Contiene lattice di gomma naturale
EN: Keep away from sunlight	ES: No exponga a luz solar
NL: Houdt weg van zonlicht	IT: Tenere lontano dalla luce del sole
FR: Éviter une exposition directe au soleil	DE: Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
EN: Do not reuse	ES: Para uso individual
NL: Voor eenmalig gebruik	IT: Per uso singolo
FR: Pour usage unique	DE: Für den einmaligen Gebrauch
EN: Use by	ES: Fecha de caducidad
NL: Houdbaar tot	IT: Data di scadenza
FR: Date d'expiration	DE: Ablaufdatum
EN: Batch code	ES: Número de lote
NL: Batch number	IT: Numero di partita
FR: Numéro de lot	DE: Batch Nummer
EN: Consult instructions before use	ES: Consulte las instrucciones antes del uso
NL: Raadpleeg instructies voor gebruik	IT: Consultare le istruzioni per l'uso
FR: Consulter les instructions avant utilisation	DE: Konsultieren Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch
EN: Caution:	ES: Precaución:
NL: Let op:	IT: Attenzione:
FR: Attention:	DE: Vorsicht:
EN: Keep dry	ES: Manténese seco
NL: Droog bewaren	IT: Conservare asciutto
FR: Garder au sec	DE: Trocken lagern
EN: Manufactured by	ES: Productor
NL: Producent	IT: Produttore
FR: Producteur	DE: Produzent
EN: Importer	FR: Importateur
NL: Importeur	ES: Importador
DE: Importeur	IT: Importatore
EN: Unique Device Identifier (UDI)	FR: Identifiant unique des dispositifs (UDI)
NL: Unieke hulpmiddelenidentificatie (UDI)	ES: Identificador único del producto (UDI)
DE: Einmalige Produktkennung (UDI)	IT: Identificazione unica dei dispositivi (UDI)
EN: Production date	FR: Date de production
NL: Productiedatum	ES: Fecha de fabricación
DE: Herstellungsdatum	IT: Data di produzione



WWW.WINGMANCONDOMS.COM

For more information, questions or suggestions, please contact us via:



info@wingmancondoms.com

T.: +31 20 30 86 500

Wingman International BV,
 Turbinestraat 1-B,
 1014 AV Amsterdam,
 The Netherlands



Manufactured by:
 Korex Industries Sdn. Bhd.
 PTD, 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya,
 Bt. 34, Jalan Johor,
 82000 Pontian, Johor, Malaysia.

Advena Ltd.
 Tower Business Centre, 2nd Fl.,
 Tower Street, Swatara, BKR 4013 Malta

